

四川省临床检验中心
性病检测室间质评说明
(2021 年)

各参加实验室：

性病检测室间质评计划是四川省临床检验中心为考察各参加实验室性病检测检测水平组织开展的室间质评计划，本次计划的要求和相关信息如下：

一. 样品信息

1. 样品状态

室间质评样品由含有正常和异常水平性病检测检测项目的人血清制备，液体。

2. 样品数量

室间质评样品数量 5 支，批号为 202111、202112、202113、202114、202115。

3. 存储条件

- (1) 未开封的性病检测室间质评样品，贮存在-15℃ 以下可稳定至有效期。
- (2) 当日未用完且无污染，可 2-8℃ 保存，须在 1 周内使用；应避免反复冻融和重新分装。

4. 样品局限性

本室间质评样品来源于人血清，应按说明的要求贮存。

二. 测试程序

1. 测试项目

本次室间质评测试项目为：抗梅毒螺旋体抗体（TPAb(特异性)）、抗梅毒螺旋体非特异性抗体（TPAb(非特异性)）、抗梅毒螺旋体非特异性抗体滴度

2. 测试方法

- (1) 室间质评样品检测时，应按日常病人检测样品处理方式处理,由日常工作人员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测，检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。
- (2) 室间质评样品检测

室间质评样品使用时待完全融化且平衡至室温，颠倒 5 次以上混匀后方可使用。

3. 注意事项

室间质评样品已经灭活处理，但仍应按有潜在生物传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

三. 结果报告

测定结果的报告形式见下表。

项目	阳性反应	阴性反应
抗梅毒螺旋体抗体	R	N
抗梅毒螺旋体非特异性抗体	R	N

抗梅毒螺旋体非特异性抗体滴度		滴度代码		滴度代码	
抗梅毒螺旋体非特异性抗体滴度代码					
代码	滴度	代码	滴度	代码	滴度
0	阴性	3	1:4	6	1:32
1	原倍	4	1:8	7	>1:32
2	1:2	5	1:16		

四. 样品废弃处理

室间质评样品无须交回，废弃处理应按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》处理。

五. 结果上报截止日期

具体上报截止日期参照下发的《关于开展 2021 年第 2 次四川省临床检验室间质量评价的通知》，逾期将不纳入结果统计。上报按要求填报操作者和科主任或负责人姓名，确认结果的有效性。

六. 联系方式

收到室间质评样品后，应立即检查样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查样品是否渗漏，如有疑问请及时联系。各科室联系电话如下：

质评室： 02887394057

中心办公室： 02887394057

四川省临床检验中心

2021 年 10 月 13 日